

Kit complet maintiens thoraciques



- Taille 1 - Pour dossiers rigides - 833031.T1
- Taille 1 - Pour dossiers souples - 833030.T1
- Taille 2 - Pour dossiers rigides - 833031.T2
- Taille 2 - Pour dossiers souples - 833030.T2
- Taille 3 - Pour dossiers rigides - 833031.T3
- Taille 3 - Pour dossiers souples - 833030.T3

- **2 kits au choix**
- **Composé d'une toile et de 2 appuis latéraux à disposer selon besoins**
- **Appuis repositionnables très rapidement**

Les maintiens thoraciques Physipro permettent un maintien latéral du tronc, de la crête iliaque à l'aisselle. Très efficaces dans les cas d'hypotonies, il est adaptable sur tous les fauteuils existants (roulants ou gériatriques).

Mise en place simple et rapide :

La toile se fixe sur le dossier en tension grâce à 3 sangles à boucle et 4 sangles dans les angles. Vous pouvez alors positionner vos appuis à la hauteur et à l'angle souhaité. Ils sont repositionnables à loisir.

Adaptabilité à vos fauteuils existants :

- Sur dossiers souples (fauteuils roulants) : choisissez le kit anti-effet hamac car l'angle des appuis est ouvert pour compenser la déformation de la toile,
- Sur dossiers rigides (fauteuils gériatriques) : choisissez le kit façonné avec un angle des appuis à 90°.

Tailles disponibles : 3 tailles au choix en fonction de la largeur du dossier : 35 à 40 cm, 40 à 45 cm et 45 à 50 cm. Profondeur standard 16,75 ou 13,75 cm sur demande.

2 kits différents en 3 tailles au choix :

- Kit complet anti-effet hamac, angle ouvert.
- Kit complet composé d'une toile et de 2 appuis latéraux à 90°.

Variantes :

- Taille 1
- Taille 2
- Taille 3

- Pour dossiers rigides
- Pour dossiers souples

Date d'impression : 07/05/2021